

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

- Design moderno e anatômico permite uma massagem versátil agindo no músculo de maneira completa ou em partes específicas.
- Prático, portátil e fácil de usar.
- Funciona a pilhas
- Fácil higienização.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: China

Incoterm

Massageador Corporal Incoterm

MC100

linha Pop

Manual de Instruções



Resistente
a água



Design
Anatômico





A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

MASSAGEADOR CORPORAL - Ref.: MC100

Parabéns pela escolha do Massageador Corporal portátil da Incoterm. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

INTRODUÇÃO

O massageador Corporal portátil Incoterm auxilia no aumento da circulação sanguínea, na melhora da capacidade respiratória e na elasticidade da pele, proporcionando conforto e bem estar. Funciona a pilhas e é produzido em plástico que facilita a higienização.

Versátil, ele pode ser utilizado com suas três esferas ou apenas uma para massagear o corpo de maneira completa ou ainda pontos específicos, seu design permite massagear costas, nuca, pernas, pés e braços.

Com o Massageador Corporal Incoterm você vai relaxar!

MODO DE FUNCIONAMENTO (OPERAÇÃO)

- Antes da primeira utilização desenrosque a tampa das pilhas na parte superior do instrumento e insira 3 pilhas tipo AAA.
- Garanta que a tampa esteja firmemente apertada após fechar.
- Para começar a usar no corpo, aplique uma leve pressão na parte superior do massageador para começar a vibração.
- Para parar a vibração pare de pressionar o massageador.

ATENÇÃO

Mantenha o massageador longe de fontes de calor. Para limpar o massageador, utilize um pano macio levemente umedecido com água. Utilize o massageador com cuidado. Retire as pilhas quando o massageador estiver fora de uso por longos períodos.

Importante: não utilize o massageador na mesma área do corpo por mais de 5 minutos.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



Nota: Ajude a preservar o meio-ambiente, coloque pilhas usadas no depósito correto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de uso: 5°C a 40°C

Alimentação: 3 pilhas de 1,5V tipo AAA

Dimensões: 105x89x74mm

Peso: 120g

Durabilidade das pilhas: Mais de 02 horas de uso contínuo

Este produto é resistente à água, porém não pode ser submerso em água.